

REF. BF2200BR

Filtro viral bacteriano em linha para unidades CPAP/BIPAP/ventilação



Não contém látex de borracha natural



Destina-se ao uso em apenas um paciente

Certifique-se de que o descarte seja seguro após o uso

Descrição e indicações do produto

O filtro viral bacteriano em linha Sunset para unidades CPAP/BIPAP/ventilação é um filtro sobressalente de uso único destinado ao uso em ventiladores mecânicos, máquinas de anestesia, dispositivos de ressuscitação manual, máquinas CPAP/BIPAP e máquinas IPPB para reduzir a passagem de partículas que podem carregar bactérias e/ou vírus transportados pelo ar. Quando usado com ventiladores mecânicos, máquinas IPPB e dispositivos de ressuscitação, o filtro sobressalente pode ser usado em aplicações hospitalares, domésticas ou de transporte. O filtro bacteriano/viral em linha Sunset é um filtro sobressalente para uso com ventiladores mecânicos, máquinas de anestesia, dispositivos de ressuscitação manual, máquinas CPAP/BIPAP e máquinas IPPB originais do fabricante (OEM).

Especificações do filtro

Eficiência de filtração bacteriana: (BFE) 99,99+%

Eficiência de filtração viral: (VFE) 99,9+%

Eficiência de filtração de materiais particulados NaCl: 96+%

Resistência ao fluxo: Aproximadamente 8,8 mmH₂O a 30 LPM

Volume interno: 66,3 ml sem conexões/78,3 ml com conexões

Conexões na extremidade do paciente: 22 mm DE/15 mm DI

Extremidade da máquina: DI de 22 mm

Cuidados

1. Consulte as Instruções de Uso do OEM para obter instruções sobre a instalação adequada dos filtros. As especificações do filtro são indicadas abaixo.
2. Consulte as instruções de uso e substituição do OEM ou do seu fornecedor.
3. A colocação do filtro entre o tubo traqueal ou de traqueostomia e o circuito respiratório do paciente aumentará o espaço morto em 78 ml. O médico compensa o espaço morto durante a configuração ventilatória; consulte nas instruções de uso do OEM a instalação adequada dos filtros.

Avisos

1. Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras.
2. Para uso em um único paciente. Não reutilize.



Fabricado para
Sunset Healthcare Solutions
141 W Jackson Blvd Ste 1950
Chicago IL 60604

**PRODUZIDO NO
MÉXICO**

IFU-00155 REV 1.00
2026-06-15