

# Filtros do gabinete de espuma para concentradores de oxigênio

## Instruções de uso

### Uso pretendido

Filtros de gabinete de espuma para concentradores de oxigênio retêm poeira, pelos de animais de estimação e grandes partículas transportadas pelo ar do ambiente, evitando que danifiquem os componentes internos do concentrador de oxigênio. Eles garantem a entrada de ar adequada e limpa, o que melhora a eficiência do dispositivo, mantém a máquina funcionando fria e mantém o desempenho ideal.

### Desempenho

Os filtros só são eficazes quando corretamente instalados com o concentrador de oxigênio ligado. Eles não exigem manutenção preventiva, corretiva ou de calibração.

### Condições ambientais

Faixa de temperatura: -4 °C a 60 °C  
Faixa de umidade relativa: 0% — 95%

### Contraindicações

Não há contraindicações conhecidas associadas ao uso deste filtro.

### Composição

Poliuretano

### Especificações

REF.	Comprimento	Largura	Compatibilidade
OF1001	208 mm	102 mm	Respironics Millennium
OF1005	76 mm	51 mm	Respironics Millennium
OF3002	210 mm	95 mm	Healthdyne Alliance
OF5001	156 mm	89 mm	DeVilbiss MC
OF6001	171 mm	121 mm	Puritan Bennett 590/592A
OF8002	133 mm	98 mm	AirSep NewLife, QuietLife, Itensity
OF9001	165 mm	86 mm	Invacare HomeFill
OF9002	229 mm	73 mm	Invacare Platinum
OF9004	178 mm	95 mm	Invacare Perfecto2
OF11003	238 mm	100 mm	Nidek Nuvo
OF11004	254 mm	105 mm	Nidek Mark
OF11005	194 mm	121 mm	SeQual Integra
OF11006	64 mm	64 mm	SeQual Eclipse

### Instruções de uso

#### Substituição de filtros:

- Consulte as instruções do concentrador de oxigênio.
- Desligue o concentrador de oxigênio e desconecte-o da tomada elétrica.
- Remova o painel de acesso do filtro ou a porta.
- Remova o filtro do gabinete de espuma usado e descarte-o.
- Instale o novo filtro.
- Coloque o painel de acesso ou a porta de volta no concentrador de oxigênio e certifique-se de que ele seja substituído corretamente.
- Reconecte o cabo de alimentação do concentrador, ligue o concentrador e retome o uso de acordo com as instruções do fabricante.
- Os filtros de gabinete de espuma para concentradores de oxigênio são projetados para serem reutilizáveis e podem ser lavados, geralmente durando vários meses a um ano. Eles devem ser lavados semanalmente ou mensalmente com sabão neutro e água morna, enxaguados completamente e completamente secos antes da reinstalação.
- Substitua os filtros do gabinete de espuma imediatamente se parecerem danificados, rasgados ou quebradiços.
- Sempre troque os filtros entre pacientes.